

# De Flow vinger pulsoximeter



*De Flow vinger pulsoximeter meet het zuurstofgehalte/ zuurstof saturatie in het bloed (%SpO<sub>2</sub>) en de hartfrequentie en is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf*

*4 jaar voor gebruik op vingers, duimen en tenen. Dit product is een medisch hulpmiddel gefabriceerd in overeenstemming met de richtlijn MDD93/42/EEG van de raad van medische hulpmiddelen. Het apparaat is gekalibreerd in de fabriek. De Flow vinger pulsoximeter kan herhaaldelijk worden gebruikt, maar niet constant en niet langer dan noodzakelijk, maximaal 30 seconden op 1 vinger. De pulsoximeter werkt op 2-AAA batterijen (niet meegeleverd) De levenscyclus is ca 3 jaar.*

## Waarvoor te gebruiken?

De zuurstofverzadiging of wel de saturatie en de polsslag kan je nu zelf meten.

Ten behoeve van de organen, het hart en de hersenen is het van belang dat de longen zorgen voor voldoende zuurstof in je bloedsomloop. Slaap apneu, astma aanvallen en zelfs longontstekingen kunnen

een tekort veroorzaken.

Met de Flow vinger pulsoximeter (6 x 3 x 3 cm) kan je zelf net als bij de arts het hartritme meten en de zuurstofverzadiging in het bloed. Je kunt nu zelf in de gaten houden of de juiste waarden in orde zijn. Als de waarden afwijken van de goede norm, waarschuwt de pulsoximeter automatisch.

## Reiniging:

Maak het apparaat schoon met (medisch) alcohol. Nooit in water dompelen en spuit geen

vloeistof op de pulsoximeter. Ook geen water gebruiken warmer 60 graden Celsius.

## Speciaal gebruik is aanbevolen bij:

(sport) inspanningen, hart- en vaatziekten, astma,

longaandoeningen en slaapapneu.

## De meet eigenschappen zijn betrouwbaar en nauwkeurig! Het werkingsadvies.

De Flow pulsoximeter werkt door de drukknop op het apparaat aan te drukken en de vingertop in foto-elektrische sensor te steken voor de diagnose. Het scherm toont direct de gemeten waarde van de hemoglobine saturatie en de hartslag. Behalve als de vingers te dun en te koud zijn, dan geeft de Flow pulsoximeter geen normale meting

van de saturatie (%SpO<sub>2</sub>) en de polsslag. Klem dan de dikke vinger of duim of de middelvinger diep genoeg in de sonde. Met lange (kunst) nagels werkt het apparaat niet. Vanaf ca. 4 jaar werkt de Flow pulsoximeter bij elk mens, maar niet op weke delen. Bij drugs gebruik geeft het apparaat veelal onnauwkeurige metingen.

## Garantie en specifieke uitvoeringskenmerken.

De garantie is 1 jaar, verwijder de batterijen als je het apparaat langer dan 1 maand niet gebruikt, de batterijen kunnen gaan lekken. Dan vervalt de garantie en eveneens

als het apparaat niet op de juiste manier wordt schoongemaakt. De Flow vingerpulsoximeter, is leverbaar in de kleur combinatie: blauw met wit.