

Nabij-infraroodlicht Therapiehelm

GEBRUIKERSHANDLEIDING



TABLE OF CONTENTS

Inleiding	1
Lees dit vóór gebruik.	3
Gebruiksaanwijzing.....	4
Opladen.....	7
Gebruiksrichtlijnen	8
Behandelaanbevelingen.....	14
Technische specificaties	15
Afmetingen van het product.....	16
Inhoudslijst.....	17
Behandelbegeleiding	18
Problemen oplossen.....	18
Waarschuwingen.	19
Contra-indicaties.....	20
Medische voorzorgsmaatregelen.....	20
Veiligheidsmaatregelen.....	21
Garantie.....	21

INLEIDING

Hartelijk dank voor de aankoop van de PBM-helm. Uw tevredenheid is voor ons van groot belang. De PBM-helm is ontworpen voor de behandeling van de hersenen.

Let op: 810 nm is nabij-infraroodlicht; dit is in een donkere kamer te zien met menselijke ogen en is ook zichtbaar via een camera of telefoon.

1070 nm is onzichtbaar nabij-infraroodlicht dat tijdens het gebruik niet kan worden waargenomen door het menselijk oog, een camera of een telefoon; dit is normaal. (ALLEEN een 1070 nm-detectiekaart kan 1070 nm detecteren; neem indien nodig contact met ons op.)

Fotobiomodulatie van de hersenen met de 810 nm/1070 nm PBM-helm:

We zijn verheugd om de nieuwe 810 nm/1070 nm PBM-helm te introduceren voor fotobiomodulatietherapie (PBM) van de hersenen met behulp van geavanceerde PBM-technologie.

Fotobiomodulatie (PBM) van de hersenen met nabij-infraroodlicht is een innovatieve therapeutische benadering voor de behandeling van diverse neurologische en psychologische aandoeningen. Deze behandeling stimuleert de mitochondriale ademhalingscomplexen, versterkt de ATP-synthese, verbetert het neuronale metabolisme en bevordert ontstekingsremmende, anti-apoptotische en antioxiderende effecten, evenals neurogenese en synaptogenese.

Studies wijzen erop dat PBM-therapie de frontale hersenfunctie bij ouderen op een veilige en kosteneffectieve manier kan verbeteren. De helm maakt gebruik van 810 nm/1070 nm nabij-infraroodlicht, een golflengte waarvan sinds 2018 is aangetoond dat deze zeer effectief is voor transcraniële lichtstimulatie.

De PBM-helm, die gebruikmaakt van nabij-infraroodgolflengten van 810 nm en 1070 nm, biedt een waardevolle therapeutische optie voor mentale gezondheid en een reeks psychische aandoeningen. Het biedt potentiële voordelen voor patiënten die te maken hebben met herstel na een beroerte, geheugenverlies, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer en andere neurologische aandoeningen die baat kunnen hebben bij nabij-infraroodlichttherapie.

De belangrijkste toepassingen bij de behandeling van hersenaandoeningen zijn onder meer:

De ziekte van Alzheimer: NIR-lichttherapie kan helpen bij het verminderen van cognitieve achteruitgang en het verbeteren van het geheugen door de neuronale functie te versterken en ontstekingen te verminderen.

De ziekte van Parkinson: Het kan helpen bij het verlichten van motorische symptomen en het verbeteren van de algehele gezondheid van de hersenen door neuroprotectie en de productie van dopamine te bevorderen.

Traumatisch hersenletsel (TBI): NIR-therapie ondersteunt het herstel na hersenletsel door celherstel te bevorderen en ontstekingen te verminderen, wat de cognitieve en fysieke resultaten kan verbeteren.

Beroerte: Het kan helpen bij het herstel na een beroerte door de bloedstroom te verbeteren, neuronale schade te verminderen en neurogenese in de aangetaste hersengebieden te bevorderen.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS): NIR-licht kan helpen bij het reguleren van emotionele reacties en het verbeteren van de stemming, en biedt zo ondersteuning aan mensen die lijden aan PTSS-symptomen.

Chronische migraine: Deze therapie kan de frequentie en intensiteit van migraineaanvallen helpen verminderen door vaatverwijding te bevorderen en zenuwontstekingen te verminderen.

Multiple sclerose (MS): NIR-therapie kan de symptomen die gepaard gaan met MS verbeteren door de neuronale functie te versterken en vermoeidheid te verminderen.

Chronisch vermoeidheidssyndroom: Het kan het energieniveau en de algehele cognitieve functie ondersteunen, waardoor symptomen die vaak bij deze aandoening voorkomen, worden aangepakt.

Dementie: NIR-lichttherapie kan cognitieve achteruitgang helpen vertragen en de kwaliteit van leven verbeteren door de gezondheid van de neuronen te bevorderen.

Angststoornissen: Door de hersenactiviteit te reguleren, kan deze therapie symptomen van angst verminderen en het emotionele welzijn verbeteren.

Slapeloosheid: NIR-therapie kan stress en angst verminderen, ontspanning bevorderen, en de aanmaak van melatonine stimuleren om de slaap te verbeteren.

Depressie: Het kan helpen bij het reguleren van neurotransmitters en het bevorderen van neuroprotectie, waardoor symptomen van depressie worden verlicht en de stemming wordt gestabiliseerd door een verbeterde doorbloeding en verminderde ontsteking.

Geheugenverlies: De therapie ondersteunt neurogenese en synaptische plasticiteit, wat de vorming en het behoud van herinneringen bevordert en tegelijkertijd de functie van hersencellen verbetert.

Verbeterde cognitie: Door neuronale activiteit te stimuleren en de ATP-productie te verhogen, versterkt NIR-therapie cognitieve functies zoals aandacht, verwerkingssnelheid en uitvoerende functies.

Chronische pijn: Biedt verlichting door pijnbanen aan te pakken en ontstekingen te verminderen die verband houden met neurologische aandoeningen.


LEES DIT VOOR GEBRUIK

Lees voor uw veiligheid het hoofdstuk „Waarschuwingen“ in deze handleiding voordat u dit product gaat gebruiken.

- Houd het apparaat uit de buurt van uw ogen (nabij-infraroodlicht kan de ogen beschadigen) en zet de „AAN/UIT“-schakelaar in de AAN-stand.
- Als u enig ongemak voelt dat wordt veroorzaakt door het gebruik van het apparaat, vergroot dan de afstand van het apparaat tot uw lichaam of stop met het gebruik.
- Gebruik het apparaat niet aan de voorkant van de keel, aangezien dit de schildklierfunctie kan verstoren.
- Als u de behandeling voortijdig wilt stoppen, **schakel dan het apparaat uit** voordat de PBM-helm van uw hoofdhaar verwijdt.

Raadpleeg uw arts als u tijdens de behandeling ongemak ondervindt. Lees de volledige gebruikershandleiding voordat u de PBM-helm in gebruik neemt, zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw PBM-helm.

GEBRUIKSAANWIJZING

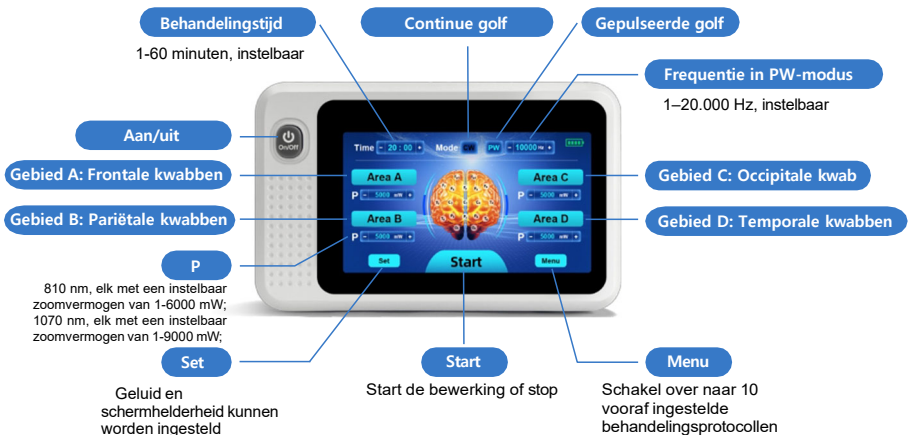

Pulsering is superieur aan CW voor de meeste toepassingen, behalve bij zenuwregeneratie.

Bekijk de onderstaande afbeeldingen en volg de stappen:



Step 1

Sluit de controller en de helm aan.



Step 2

Houd de aan/uit-knop lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen.



Step 3

Kies de werkmodus **CW** of **PW**. **CW** staat voor continue golf (de diodes blijven continu branden) en **PW** staat voor gepulseerde golf (de diodes gaan aan en uit).



Step 4

Kies de ruimte en stel het vermogen in. Vier zone-kamers: **frontale kwab** (gebied A), **pariëtale kwabben** (gebied B), **occipitale kwabben** (gebied C) en **temporale kwabben** (gebied D). Elke zone kan afzonderlijk werken, maar kan ook samenwerken met andere zonekamers. 810 nm, elk met een instelbaar vermogen van 1-6000 mW; (1070 nm, elk met een instelbaar vermogen van 1-9000 mW;)



Step 5

Stel de frequentie in (deze stap is niet nodig in de CW-modus). **De frequentie** is instelbaar van 1 tot 20.000 Hz.



Step 6

Stel de behandel tijd in. **De tijd** is instelbaar van 1 tot 60 minuten instelbaar.



Stap 7

Stel het geluid en de helderheid van het scherm in.



Stap 8

Geniet van de behandeling.



Stap 9

Klik op **het menu** en sla het behandelprotocol op

Gebruik van de PBM-helm:

1. Koppel de oplader los van de controller;
2. ZORG ERVOOR DAT DE HELM IS UITGESCHAKELD;
3. Sluit de controller aan op de PBM-helm;
4. Zet de PBM-helm direct op het hoofd;

5. Schakel de stroom in door op de knop 'ON/OFF' op de controller te drukken. Wanneer u op de 'ON/OFF'-knop drukt, wordt ons apparaat ingeschakeld, maar de PBM-behandeling begint nog niet direct; U kunt op de 'Start'-knop drukken om de behandeling te starten of te stoppen.
6. Stel de behandelingsduur in tussen 1 en 60 minuten (stel bijvoorbeeld 20 minuten in);
7. Tik op het touchscreen van de controller op de bijbehorende knoppen om de werkmodus en de zone in te stellen. Er zijn twee modi: Continuous Wave (CW) en Pulsed Wave (PW). Alleen in de PW-modus kan de frequentie worden aangepast.
8. Na 20 minuten of de vooraf ingestelde tijd schakelt de PBM-helm zichzelf uit.

HOE DE -OPLADER TE GEBRUIKEN

1. Sluit de oplader aan op de controller;
2. Steek de oplader in een stopcontact; Houd het scherm van de controller in de gaten; als het batterijniveau verandert, betekent dit dat het apparaat wordt opgeladen.
3. HOUD DE HELM UITGESCHAKELD TIJDENS HET OPLADEN. Wanneer het batterijniveau bijna vol is, is de batterij volledig opgeladen. U kunt de oplader nu verwijderen en de PBM-helm is klaar voor gebruik.

(Let op: GEBRUIK UITSLUITEND DE MEEGELEVERDE LADER.)




GEBRUIKSRIJCHLIJNEN

De 810 nm/1070 nm hersentherapiehelm is een professioneel apparaat voor fotobiomodulatie (PBM) in het nabij-infraroodspectrum, ontworpen voor gerichte en volledige lichtstimulatie van de hersenen.

Door specifieke golflengten van licht op verschillende hersengebieden te richten, ondersteunt het apparaat het energiemetabolisme van neuronen, de cognitieve functies, emotionele regulatie, motorische controle en sensorische integratie.

Deze behandelingsgids biedt aanbevolen therapieprotocollen op basis van hersengebieden en neurologische aandoeningen. De pulsfrequentie, werkmodus, behandelingsduur en behandelingsfrequentie kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke toepassing. Deze aanbevelingen zijn bedoeld als algemene referentie en gebruikers dienen altijd de richtlijnen van het apparaat te volgen of, indien nodig, professioneel medisch advies in te winnen.

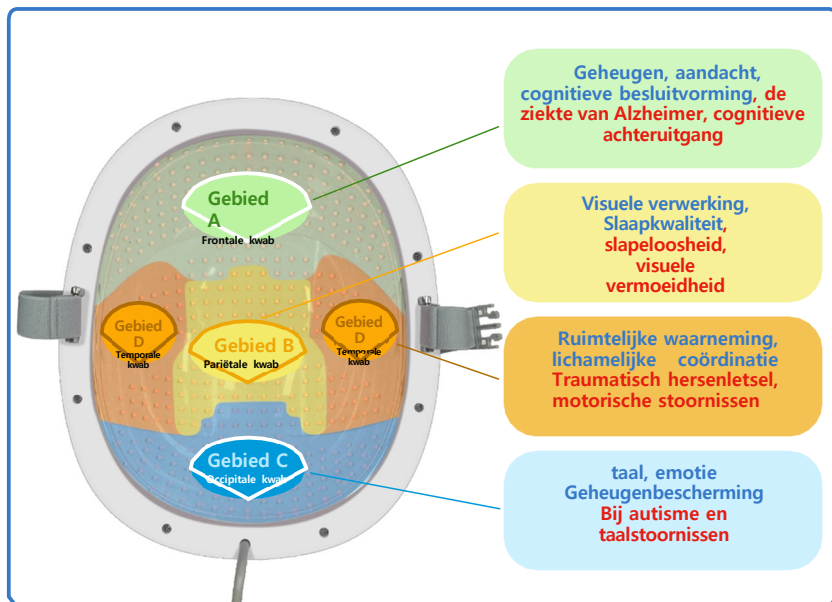


1. Ziekte van Parkinson

- Werkgebieden:

Gebied A – Frontale kwab

Gebied D – Temporale kwab

- Werkmodus: gepulseerde modus
- Frequentie: 40 Hz (aanbevolen) of 10 Hz
- Vermogen: 3–6 W per actieve zone
- Behandelingstijd: 20–30 minuten
- Behandelingsfrequentie: 3–5 keer per week
- Doel: Ondersteunt dopamine-gerelateerde processen, motorische controle en emotionele regulatie.

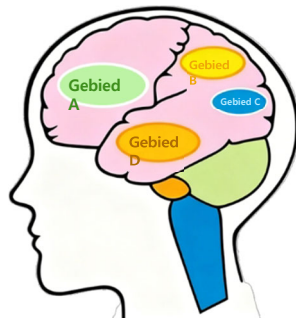

2. Ziekte van Alzheimer / dementie

- Behandelgebieden:

Gebied D – Temporale kwab (primair)

Gebied A – Frontale kwab

Gebied B – pariëtale kwab

- Werkmodus: gepulseerde modus
- Frequentie: 40 Hz
- Vermogen: 3–6 W per zone
- Behandelingstijd: 20–30 minuten
- Behandelingsfrequentie: 3–5 keer per week
- Doel: Ondersteunt het geheugen, de cognitie, de uitvoerende functies en de neurale synchronisatie.

3. Hersenenatrofie

- Behandelingsgebieden:

Gebied A –Frontale kwab,

Gebied B – Pariëtale kwab,

Gebied C –Occipitale kwab

- Werkmodus: gepulseerd of continu
- Frequentie: 10 Hz of 40 Hz
- Vermogen: 3–6 W per zone
- Behandelingstijd: 20–30 minuten
- Behandelingsfrequentie: 3 keer per week
- Doel: Verbetert de cerebrale circulatie, het celmetabolisme en de algehele ondersteuning van de hersenschors.

4. Herstel na een herseninfarct / beroerte

- Behandelingsgebieden:

Gebied B – Pariëtale kwab (primair)

Gebied A – Frontale kwab

- Werkmodus: gepulseerde modus
- Frequentie: 10 Hz
- Vermogen: 3–6 W per zone
- Behandelingstijd: 20–30 minuten
- Behandelingsfrequentie: 3–5 keer per week
- Doel: Ondersteunt motorisch herstel, sensorische integratie en neurale plasticiteit.

5. Traumatisch hersenletsel (TBI)

- Behandelgebieden:

Gebied A – Frontale kwab

Gebied C – Occipitale kwab

Gebied D – Temporale kwab

- Werkmodus: gepulseerde modus
- Frequentie: 10 Hz
- Vermogen: 3–6 W per zone
- Behandelingstijd: 20–30 minuten
- Behandelingsfrequentie: 3 keer per week
- Doel: Ondersteunt cognitief herstel, de doorbloeding en het herstel van zenuwcellen.



6. Depressie

- Behandelingsgebieden:

Gebied A – Frontale kwab

Gebied D – Temporale kwab

- Werkmodus: gepulseerde modus
- Frequentie: 8–10 Hz
- Vermogen: 2–5 W per zone
- Behandelingstijd: 20 minuten
- Behandelingsfrequentie: 3–5 keer per week
- Doel: Ondersteunt stemmingsregulatie, emotioneel evenwicht en de frontale-limbische banen.

7. Angst / PTSS

- Behandelgebieden:

Gebied A – Frontale

kwab Gebied D –

Temporale kwab

- Werkmodus: gepulseerde modus
- Frequentie: 10 Hz
- Vermogen: 2–5 W per zone
- Behandelingstijd: 20 minuten
- Behandelingsfrequentie: 3–5 keer per week
- Doel: Bevordert ontspanning, emotionele regulatie en een evenwichtige stressrespons.

8. Autisme / ASS

- Behandelgebieden:

Gebied A – Frontale kwab

Gebied D – Temporale kwab

- Werkmodus: gepulseerde modus
- Frequentie: 10 Hz of 40 Hz

- Vermogen: 2–5 W per zone
- Behandelingstijd: 15–25 minuten
- Behandelingsfrequentie: 3 keer per week
- Doel: Ondersteunt sociale interactie, taalverwerking en emotionele regulatie.

9. ADHD

- Werkgebieden:

Gebied A – Frontale kwab

- Werkmodus: gepulseerde modus
- Frequentie: 10 Hz
- Vermogen: 2–5 W
- Behandelingstijd: 15–20 minuten
- Behandelingsfrequentie: 3–5 keer per week
- Doel: Ondersteunt de aandacht, impulsbeheersing en uitvoerende functies.

10. Geheugenverlies / leermoeilijkheden

- Werkgebieden:

Gebied D – Temporale kwab

Gebied A – Frontale kwab

- Werkmodus: gepulseerde modus
- Frequentie: 40 Hz
- Vermogen: 3–6 W per zone
- Behandelingstijd: 20–30 minuten
- Behandelingsfrequentie: 3 keer per week
- Doel: Verbeterd de geheugenconsolidatie en cognitieve verwerking.

11. 'Brain Fog'

- Werkgebieden:

Gebied A – Frontale kwab

Gebied C – Occipitaal

- Werkmodus: Gepulseerd of continu
- Frequentie: 10 Hz
- Vermogen: 3–6 W per zone
- Behandelingstijd: 20 minuten
- Behandelingsfrequentie: 2–3 keer per week
- Doel: Verbetert de mentale helderheid, alertheid en de bloedtoevoer naar de hersenen.

12. Migraine en hoofdpijn

- Behandelingsgebieden:

Gebied C – Occipitaal

Gebied D – Temporaal

- Werkmodus: gepulseerde modus
- Frequentie: 8–10 Hz
- Vermogen: 2–5 W per zone
- Behandelingstijd: 15–20 minuten
- Behandelingsfrequentie: 2–3 keer per week
- Doel: Verlicht spanning, ondersteunt de regulering van de bloedvaten en vermindert de frequentie van hoofdpijn.

13. Slapeloosheid

- Behandelgebieden:

Gebied A – Voorhoofd

Gebied D – Temporaal Slaapgebied

- Werkmodus: gepulseerde modus
- Frequentie: 8–10 Hz
- Vermogen: 2–4 W per zone
- Behandelingstijd: 20 minuten (voor het slapengaan)
- Behandelingsfrequentie: dagelijks of 3–5 keer per week
- Doel: Bevordert ontspanning en ondersteunt gezonde slaapcycli.

AANBEVELINGEN VOOR DE BEHANDEL



Aandoening / Toepassing	Aanbevolen hersenzones	Zone Kamer	Aanbevolen frequentie
Ziekte van Parkinson	Frontale + temporale	Gebied A + Gebied D	40 Hz of 10 Hz
Ziekte van Alzheimer	Temporale + frontale + pariëtaal	Gebied A + Gebied B + Gebied D	40 Hz
Dementie	Temporale kwab + frontale kwab	Gebied A + Gebied D	40 Hz
Hersenenatrofie	Frontale + pariëtale kwab + occipitaal	Gebied A + Gebied B + gebied C	10 Hz of 40 Hz
Herseninfarct	Pariëtale + frontale	Gebied A + Gebied B	10 Hz
Depressie	Frontale + temporale	Gebied A + Gebied D	8–10 Hz
Angst	Frontale + temporale	Gebied A + Gebied D	10 Hz
PTSS	Frontale + temporale	Gebied A + Gebied D	10 Hz
Autisme / ASS	Frontale + temporale	Gebied A + Gebied D	10 Hz of 40 Hz
Herstel na een beroerte	Pariëtale + frontale	Gebied A + Gebied B	10 Hz
Traumatisch hersenletsel (TBI)	Frontale + occipitale + Temporale	Gebied A + Gebied C + gebied D	10 Hz
Geheugen-problemen	Temporale kwab + frontale kwab	Gebied A + Gebied D	40 Hz
Hersennevel	Frontale + occipitale	Gebied A + Gebied C	10 Hz
Migraine en hoofdpijn	Occipitaal + Temporale	Gebied C + Gebied D	8–10 Hz
Slapeloosheid	Frontale + temporale	Gebied A + Gebied D	10 Hz

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Modelnummer:	☐ LH280-N810 ☐ LH280-N1070 ☐ Overige _____
Max. vermogen:	☐ 24 W ☐ 36 W ☐ Overige _____
Aantal diodes:	☐ 448 stuks ☐ Overige _____
Golflengte:	☐ 810 nm ☐ 1070 nm ☐ Overige _____
Lichtbron:	☐ LED-chips ☐ Overige _____
Werkingsmodus:	Continu golven en gepulseerde golven, instelbaar
Regeling uitgangsvermogen:	☐ 1-24 W ☐ 1-36 W ☐ Overige _____
Frequentie (instelbaar):	☐ 1 Hz - 20.000 Hz, instelbaar ☐ Overige _____
Afmetingen touchscreen	10,95 × 6,12 cm / 4,31 × 2,41 inch
Tijdstelling:	1-60 minuten instelbaar
Bedieningsmodus:	Bedieningspaneel met LCD-scherm
Voeding:	Oplaadbare lithiumbatterij (10.000 mAh)
Ingangsspanning:	AC 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz of DC 12 V

PRODUCT AFMETINGEN

Binnendiepte: 11 cm/4,33 inch

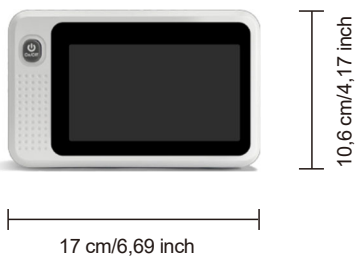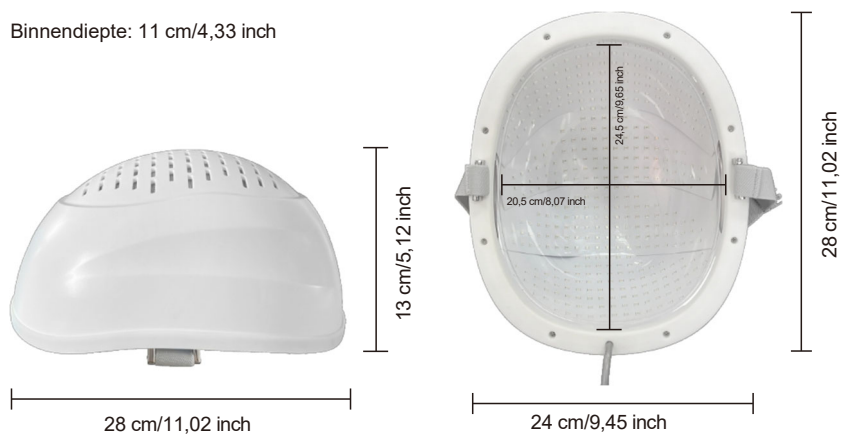

LIJST VERPAKKING



Verpakkingsdo



PBM-helm



Gebruikershandl



Brilverpakking



Veiligheids



Controller



AC-adapter



Opladkabel (VS/AU/EU/VK)

Opmerking: Het type stekker (EU, UK, US, AU, enz.) wordt geleverd op basis van het land van bestemming van uw bestelling.

BEGELEIDING BIJ DE BEHANDELING

Wij raden aan om elke behandeling 10-20 minuten te laten duren, om de dag een behandeling te ondergaan, of volgens de instructies van uw arts.

OVERSCHRIJD DE 60 MINUTEN PER BEHANDELINGSSESSIE NIET, tenzij anders aangegeven door uw arts. Als het behandelresultaat niet goed is, kunt u het vermogen verhogen of het aantal behandelingen per dag verhogen.

Aangezien wij niet alles weten over uw medische geschiedenis en medicatie, dient u uw arts te raadplegen voordat u nieuwe protocollen of supplementen gaat gebruiken.

Beschouw de informatie op deze website niet als vervanging voor daadwerkelijk medisch advies. De informatie die u van ons ontvangt, is niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van uw arts.

Ons bedrijf geeft geen medisch advies, schrijft geen medicijnen voor en stelt geen diagnoses. Wij bieden natuurlijke gezondheidsbehandelingen aan om uw gezondheid te verbeteren. De door ons geuite standpunten en suggesties zijn niet bedoeld als vervanging van conventionele medische zorg. Als u een medische aandoening heeft, volg dan het advies van uw arts op.

PROBLEEMOPLOSSING

De PBM-helm bevat geen onderdelen die door de klant kunnen worden gerepareerd.

CONTROLEER HET VOLGENDE WANNEER U EEN PROBLEEM HEEFT:

Persoonsgebonden:

- Voelt u zich ongemakkelijk tijdens het gebruik? Stop dan onmiddellijk met het gebruik. Raadpleeg een arts als dit aanhoudt. Zorg ervoor dat u het apparaat volgens de instructies gebruikt.

Apparaat gerelateerd:

- Als het apparaat niet oplicht, niet knippert of zeer zwak licht geeft, controleer dan of de batterij bijna leeg is.

WAARSCHUWINGEN

Probeer het apparaat **NIET** uit elkaar te halen. Gebruik het apparaat **NIET** tijdens het slapen, autorijden, roken of onder invloed. Gebruik dit product **NIET** voor uw ogen of rond uw ogen.

Wikkel de stroomkabels **NIET** strak om het apparaat.

Gebruik **het apparaat NIET** als het beschadigd, defect, gerafeld of versleten is, of als de kabels of het apparaat in contact zijn geweest met water.

Kijk **NIET** rechtstreeks in de lampjes zonder de veiligheidsbril te dragen wanneer het apparaat is ingeschakeld.

Gebruik het apparaat **NIET** en steek of trek de stekker **NIET** uit het stopcontact met natte handen.

Laat het apparaat **NIET** onbeheerd achter terwijl het in werking is.

Vergeet **NIET** de veiligheidsbril te dragen wanneer u het apparaat gebruikt.

Dompel het apparaat **NIET** onder in water. Het is niet waterdicht. Houd het uit de buurt van vloeistoffen.

Laat het apparaat en de voedingskabels **NIET** in de buurt van warmtebronnen en vuur liggen.

Overmatige hitte kan brand, elektrische schokken of letsel aan personen of schade aan eigendommen veroorzaken.

Vergeet **NIET** het apparaat en de oplaadkabel vóór gebruik te controleren.

Gebruik **GEEN** andere voedingsadapter en/of USB-voedingskabel; gebruik de meegeleverde voedingsadapter en/of USB-voedingskabel met de opgegeven spanning om het apparaat van stroom te voorzien.

Vergeet **NIET** het apparaat na elk gebruik uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.

CONTRA-INDICATIES

- **Zwangerschap** – Dit apparaat is niet getest voor gebruik bij zwangere vrouwen, zuigelingen of peuters.
- **Kanker** – Dit apparaat is niet geëvalueerd bij patiënten met kanker.
- **Koorts** (lichaamstemperatuur hoger dan 100,4 °F/38 °C)
- Als u een pacemaker heeft.
- Als u last heeft van door licht veroorzaakte epileptische aanvallen.
- Gebruik **het apparaat niet** direct op de schildklier (voorkant van de keel). De invloed van verhoogde temperatuur op de schildklier is op dit moment onduidelijk.
- Gebruik ten minste een half uur vóór de behandeling **geen** huidcrèmes, oliën, retinol of lotions van welke aard dan ook. Elk type huidlotion kan de huid overgevoelig maken voor het licht.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 13 jaar, omdat hun huid te gevoelig kan zijn.

MEDISCHE VOORZORGSMAAT

Dit apparaat zendt geen UV-straling of andere schadelijke straling uit.

- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen die wilsonbekwaam of bewusteloos zijn.
- Laat kinderen niet zonder toezicht achter bij het apparaat.
- Laat kinderen het apparaat niet gebruiken – dit is geen speelgoed.
- Gebruik het apparaat niet op plekken met gekneusde, beschadigde of gevoelige huid.
- Ga niet op of tegen dit apparaat zitten, vouw het niet op, plet het niet en ga er niet op liggen.
- Gebruik het apparaat niet in combinatie met linimenten, zalven of crèmes die warmteproducerende ingrediënten bevatten, aangezien de huid hierdoor verbrand kan raken.
- Als het apparaat te heet begint aan te voelen, schakel het dan onmiddellijk uit. Stop met het gebruik als de warmte ongemak veroorzaakt.

VEILIGHEIDS -VOORZORGSMAATREGELEN

Dit product is vervaardigd en gecertificeerd in overeenstemming met IEC/EN 60825-1:2014.

- Gebruik het apparaat **niet** in de buurt van water. Contact met water kan een elektrische schok veroorzaken. Dit apparaat is niet waterdicht. Plaats of bewaar het apparaat niet in de buurt van een bad, wastafel, toilet of andere plaatsen waar het apparaat in contact kan komen met water.
- Kijk **niet** rechtstreeks in het licht, want dit kan pijnlijk zijn voor gevoelige ogen.
- Het pijnverlichtingsapparaat bestaat uit elektronische schakelingen. Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik, de opslag en het vervoeren van het apparaat.
- Leg het apparaat (wanneer de stroom is ingeschakeld) **niet** plat op een oppervlak van plastic, hout of een ander
- warmtegevoelig oppervlak. De warmte van het apparaat kan schade veroorzaken.
- Gebruik **het apparaat niet** op een natte of vochtige huid. Elektronica kan beschadigd raken bij blootstelling aan water.
- Dompel het apparaat bij het schoonmaken **NOOIT** onder in water en was het niet met water. Gebruik altijd een zachte, droge doek om het apparaat schoon te maken.
- **[Tips voor het onderhoud van de batterij]** Om de prestaties van de batterij te beschermen en onherstelbare schade te voorkomen, wordt aanbevolen het product eens in de twee maanden op te laden om de levensduur van de batterij te waarborgen.

GARANTIE

Bij normaal gebruik geldt voor dit product een garantie van 1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum tegen fabricagefouten in materiaal of afwerking. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper.

Mocht het product binnen de garantieperiode defect raken, neem dan contact op met uw leverancier. Neem gerust contact met ons op via info@zjzklasershop.com of bezoek www.zjzklasershop.com als u opmerkingen heeft over dit therapieapparaat of deze gebruikershandleiding.

